

kein Verdrängen von Weichgewebe, sehr gut verformbar

das klügere gibt nach!



Detaseal® *function*

Das erste A-Silikon für die Funktionsabformung

- speziell für die funktionelle Abformung in der Totalprothetik
- ideale, weichgeschmeidige Konsistenz
- definierte **plastische Phase** und verlängerte Abbindephase im Mund
- bequemes Ausführen sämtlicher Funktionsbewegungen
- sicherer Sitz der Prothesenbasis durch Saugwirkung

new!


Ihr Dental-Depot:



2 x 80 ml Dispenser
inkl.
Randgestaltungsspritze

Detaseal® *function*

Spezialsilikon für die Funktionsabformung und funktionelle Randgestaltung, mit verlängerter plastischer Phase und definierter Abbindephase.

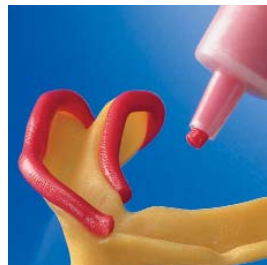

- Ideale, weichgeschmeidige Konsistenz, **sehr gut verformbar**. Abgestimmt auf die bewegliche Schleimhaut. Auch für schwierige Kieferverhältnisse geeignet.
- Optimale Mischkontrolle durch leuchtende Kontrastfarben.
- Detailscharfe Reproduktion und Dimensionstreu der funktionellen Muskelbewegungen, **ohne Verdrängen** von Weichgewebe. Das Material bleibt dabei form- und volumenbeständig.
- Mit verlängerter Abbindephase (4 Min. Mundverweildauer – davon 2:30 Min. für die plastische Ausformung). Dies gewährleistet ein **bequemes Ausführen** sämtlicher Funktionsbewegungen.
- Ein **sicherer Halt** der Prothese ist in allen Funktionsphasen gewährleistet. Die basale Saugwirkung sorgt zusätzlich für einen festen Sitz der Prothesenbasis.
- Mit Randgestaltungsspritze zur funktionellen Randgestaltung, vereinfacht das Beschicken des Löffelrandes.
- **Detaseal® function** lässt sich problemlos verarbeiten, ist leicht zu dosieren (Dosierspritze) und angenehm im Geschmack.

Mischzeit	0:30
Applikation	1:30 min
Funktionelle Phase	2:30 min
Abbindephase	1:30 min
Verarbeitungszeit	2:00 min
Verweildauer im Mund	4:00 min
Abbindezeit	6:00 min

Anwendungsbereiche:

- Spezialabformmasse für die funktionelle Abformung mit verlängerter Abbindephase
- Funktionelle Randgestaltung
- Vereinfachte Funktionsabformung in einer Sitzung mit si-plast trays

Verarbeitungstechnik:

Detaseal® *function* aus den Dosierspritzen vorlegen. Die Dosierung 1:1 durch gleiche Stranglängen von Base und Catalyst einhalten. Zwischen den Fingern kneten, bis eine homogene Vermischung erreicht ist. Der Abformträger kann nun beschickt werden. Die Applikation für die individuelle Randgestaltung wird durch Verwendung der beigelegten Applikations-spritze erleichtert. Die Spitze der Applikations-spritze kann, um die Strangstärke zu erhöhen, individuell gekürzt werden. Die Abformung sollte nicht vor 30 Min. nach Entnahme aus dem Mund ausgegossen werden. Die Dimensionsstabilität ist für 14 Tage gewährleistet. Empfohlene Modellmaterialien sind Dentalgipse der Klasse III und IV.

Verarbeitungszeit: ca. 2 Min. ab Mischbeginn

Verweildauer im Mund: ca. 4 Min. inkl. 2:30 Min. plastische Phase

Abbindezeit: ca. 6 Min. ab Mischbeginn

Bestell-Information:

(Depot-Preis und -Bestellnummer erfahren Sie bei Ihrem Dental-Depot)

Detaseal® *function*

Standardpackung **02521**

2 x 80 ml Dispenser
Base + Catalyst
1 Randgestaltungsspritze

Detaseal® Adhesive *rapid* **02324**

15 ml Flasche

Applikationsspritzen **02802**

10 St.

si-plast trays **02367**

jew. 4 St. OK-, UK-Träger
4 St. Gaumenschablone
8 St. Metallgriffe
12 St. Fixierungsstifte

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 4 · 76275 Ettlingen
Telefon 07243 / 510-0 · Fax 07243 / 510-100
www.detax.de · post@detax.de

Made in
Germany

