

# Das ist die Härte!

## greenbite *apple* - Bissregistriermaterial auf A-Silikonbasis

mit **Apfelaroma**

### 3 X echter Vorteil:

- **Extrem kurze Mundverweildauer:**  
Nach nur 60 Sekunden ist das Bissregistrat vollständig ausgehärtet.
- **Maximale Endhärte von 45 Shore D:**  
Ideal zum Weiterverarbeiten (schneiden, fräsen).
- **Mit gratis Konturierungsdüsen:**  
Zur präzisen und materialsparenden Applikation.

Ihr Dental-Depot:



# greenbite apple

## Bissregistrierungsmaterial auf A-Silikonbasis, additionsvernetzend, schnellabbindend, für die Direktapplikation, im Automix2 Kartuschensystem

■ Durch die Applikation mit Konturierungsdüsen wird **greenbite apple** **schnell und präzise** dosiert aus der Kartusche direkt auf die Zahnreihe aufgetragen. Die flache Strangform ermöglicht eine optimale Erfassung des relevanten Arbeitsbereiches und verhindert eine unnötige Verdrängung von Überflussmaterial.



■ **greenbite apple** ist **thixotrop und standfest** und fließt nicht in Interdentalräume. Die Bissnahme ist somit leicht und ohne Abreißen zu entnehmen.



■ Das **patientenfreundliche, angenehme „Grüner-Apfel“ - Aroma** erzeugt keine Geschmacksirritationen und unterstützt eine stressfreie Bissnahme.

■ Nach einer **äußerst kurzen Mundverweildauer** von nur 60 Sekunden kann **greenbite apple** bereits entnommen werden und ist durch die extrem hohe **Endhärte Shore D 45** hervorragend weiterzuverarbeiten (schneiden, fräsen).

■ **greenbite apple** ist zeichnungsscharf und zuverlässig dimensionsstabil. Seine hervorragende Lesbarkeit bietet bei der Montage der Modelle in der Technik eine perfekte Kontrolle und **frühzeitige Erkennung von Störungen der Okklusion**.



Made in Germany



### Indikationen:

Für alle Arten von Bissregistrierungen in der Kronen- und Brückentechnik und bei kieferorthopädischen Indikationen. Als Verschlüsselungsmaterial für intraorale Stützstiftregistratur und zur Verschlüsselung bei der Registrierung mit Gesichtsbögen.

### Verarbeitungstechnik:

Das Auspressen der Kartuschen erfolgt mit der Automix2-System Pistole. **greenbite apple** direkt aus der Mischkanüle oder unter Verwendung einer Konturierungsdüse auf die Zahnreihe aufbringen. In der Schlussbiss-Stellung kann von vestibulär appliziert werden. Registratur in der Schlussbiss-Stellung aushärten lassen und nach 1 Min. aus dem Mund entnehmen. Das Registratur unter fließendem, lauwarmem Wasser abspülen. Eine anschließende Desinfektion kann für 15 Min. in 2% Glutaraldehyd erfolgen. Zur weiteren Bearbeitung kann die **greenbite apple** - Bissnahme durch Schneiden oder Fräsen reduziert werden. Bei der Übertragung des Bissregistrates auf die Modelle, sind eventuelle Unterschnittstellen und Störkontakte, aufgrund der hohen Härte und Dimensionsstabilität, deutlich zu erkennen. Nach Entfernen dieser Bereiche Modelle und Registratur mit einem harten Wachs fixieren. Anschließend erfolgt die Montage im Artikulator.

Verarbeitungszeit: ca. 30 Sek.  
Verweildauer im Mund: ca. 1 Min.  
Abbindezeit: ca. 1 Min. 30 Sek.  
Shore Härte D: 45

### Bestell-Information:

(DETAX-Artikelnummern; erfragen Sie bitte bei Ihrem Depot die Depot-Bestellnummer)

#### greenbite apple

Standardpackung **02641**  
2 x 50 ml Kartuschen  
12 Mischkanülen, grün  
12 Konturierungsdüsen für Mischkanülen grün

Ecopackung **02647**  
8 x 50 ml Kartuschen  
48 Mischkanülen, grün  
48 Konturierungsdüsen für Mischkanülen grün

Mischkanülen **02705**  
grün  
48 St.

Konturierungsdüsen **02648**  
für Mischkanülen grün  
12 St.

## DETAX

GmbH & Co. KG  
Postfach 10 02 25 · 76256 Ettlingen  
Telefon 07243/510-0 · Fax 07243/510-100  
www.detax.de · post@detax.de