


*Passt wie angegossen: das NEUE Premium Provisorium*

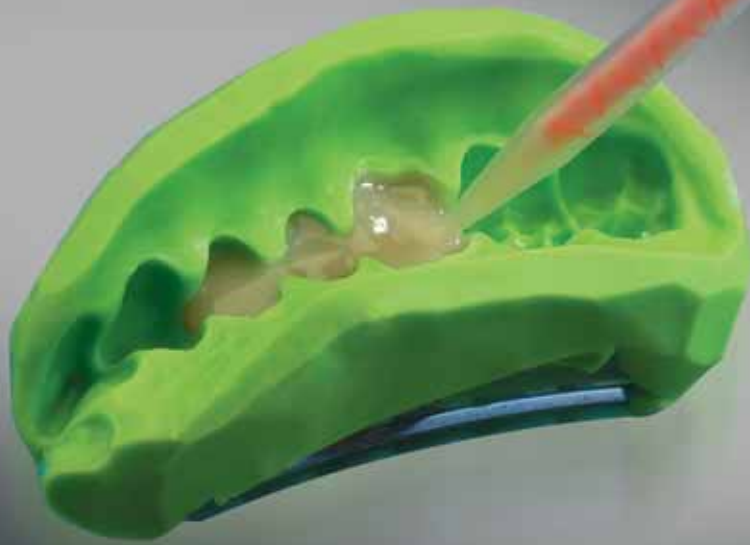

fast zu schade  
als Übergangslösung



## tempofit® premium

### Composite für temporäre Kronen & Brücken 10:1, selbsthärtend

Spitzenformulierung mit vorbildlichen Materialeigenschaften durch den Einsatz neuartiger Polymerharzmatrix, für hochwertige Kurz- und Langzeitprovisorien

- **außergewöhnlich bruchstabil**, höchste Biege- und Abrasionsfestigkeit
- **passgenau** und spannungsfrei durch optimale Konsistenz (z.B. niedriger Verdrängungswiderstand) und kleinstmöglicher Polymerisations-Schrumpfung
- **minimalste Wärmeentwicklung** beim Aushärten
- sichere Entnahme der Provisorien durch eine **definierte elastische Phase**
- brillante, transluzente Farben für eine besonders **natürliche Zahnästhetik** und Fluoreszenz, auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen!
- **absolut farbstabil**, über die gesamte Tragedauer, geschmacksneutral
- einfaches Oberflächenfinish, hervorragend beschleif- und polierbar



# tempofit® premium

## Provisorisches Kronen- & Brückenmaterial 10:1, selbsthärtend

- natürliche Ästhetik durch langzeit-farbstabile Pigmente, hochglanzpolierbar, farblich individuell charakterisierbar, kompatibel mit lichterhärtenden Composites
- keine Irritationen von Pulpa und Gingiva durch minimale Polymerisationstemperatur
- zur Direktapplikation im Automix2 Kartuschensystem, im optimalen Mischungsverhältnis 10:1

### smartrepair® – lichterhärtend, Composite



In praktischen Applikationsspritzen, mit austauschbaren Nadeln, zur punktgenauen Applikation. Selbst komplizierte Reparaturen, Ergänzungen von Kronenrändern und anatomische Konturierungen lassen sich schnell & präzise durchführen. Intra- und extraoral zu verarbeiten.

smartbond® – one-step bonding – wird in nur einem Arbeitsschritt gezielt und sparsam auf die Reparaturstelle aufgetragen und kann zeitgleich mit smartrepair® lichtpolymerisiert werden.

## tempolink®

### Provisorische Befestigungszemente für Kronen- & Brückenprovisorien

#### tempolink® single/multi

- hydrophiler Polycarboxylatzement, selbsthärtend, eugenolfrei
- dünner Randspalt, dichter Verschluss, sichere Haftung
- keine Dehydrierung der Präparation, kein Eindringen von Bakterien
- antibakteriell, geruchs- und geschmacksneutral
- **single – 60 Sek.** zur Anfertigung von Einzelkronen, kleineren Arbeiten
- **multi – 150 Sek.** für mehrgliedrige Provisorien, größere Arbeiten

auch transparent erhältlich:

#### tempolink® clear

- auf Kompositbasis
- duales Härterssystem: selbst- & lichterhärtend
- flexible Verarbeitungszeiten
- ideal im Frontzahnbereich
- geringer Verdrängungswiderstand, leichte Eingliederung



## DETAX

GmbH & Co. KG  
Carl-Zeiss-Straße 4 · 76275 Ettlingen  
Telefon 07243 / 510-0 · Fax 07243 / 510-100  
www.detax.de · post@detax.de

Made in  
Germany



#### Anwendungsbereiche:

Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken in der Kurz- und Langzeitanwendung. Schutz der Präparation vor oralen Einflüssen.

#### Verarbeitungstechnik:

Die Situation vor der Präparation kann durch Abformung mittels Silikon oder Verwendung einer thermoplastischen Schiene festgehalten werden. tempofit® premium wird direkt aus der Kartusche in die Situationsabformung appliziert. Das Material ist in der plastischen Phase gut entformbar und nach kürzester Zeit ausgezeichnet schleif- und hochglanzpolierbar. Reparaturen und Korrekturen werden zeitsparend mit dem lichterhärtenden smartrepair® Systemreparaturmaterial durch direkte Applikation leicht und sicher durchgeführt. Zum temporären Eingliedern der Provisorien empfehlen wir die eugenolfreien Befestigungszemente tempolink®.

#### Dosieren und Applizieren:

ca. 30 Sek.

#### Verweildauer im Mund:

ca. 1 Min. 30 Sek.

#### Abbindezeit:

ca. 5–6 Min.

#### Bestell-Information:

##### tempofit® premium 10:1

**Standardpack A2** 02201  
50 ml Kartusche 10:1  
10 Mischkanülen, blau

**Standardpack A3** 02209  
50 ml Kartusche 10:1  
10 Mischkanülen, blau

**Standardpack A3,5** 02217  
50 ml Kartusche 10:1  
10 Mischkanülen, blau

**Mischpistole 10:1** 02808

**Mischkanülen 10:1** 02183  
blau, 25 St.

##### tempolink®

**tempolink® single** 02598  
5 ml Kartusche mini-mix 1:1  
8 Mischkanülen, braun

**tempolink® multi** 02596  
5 ml Kartusche mini-mix 1:1  
8 Mischkanülen, braun

**tempolink® clear** 02593  
5 ml Kartusche mini-mix 1:1  
8 Mischkanülen, braun

**Mischkanülen 1:1** 02761  
braun, 25 Stück

**Mischkanülen 4:1** 02591  
braun, 25 Stück